

# AeroChamber Plus Flow-Vu

Antistatische Inhalierhilfe

mit Maske für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren



## GEBRAUCHSINFORMATION

Die AeroChamber Plus\* Flow-Vu\* ermöglicht die einfache und sichere Inhalation mit einem von Ihrem Arzt verordneten Dosieraerosol.

Das Aerosol wird in die antistatische Kammer der AeroChamber Plus\* Flow-Vu\* abgegeben und kann von dort problemlos inhaliert werden, ohne dass die Atmung und das Auslösen des Dosieraerosols koordiniert werden müssen.

Die Inhalierhilfe ist zur Benutzung für ein- und denselben Patienten gedacht.

Weitere Informationen sowie Videoanimationen finden Sie unter [www.aerochamber.hexal.de](http://www.aerochamber.hexal.de)

## Verwendung der AeroChamber Plus\* Flow-Vu\*

Vor Gebrauch ist sicherzustellen, dass diese Gebrauchsinformation und die dem Dosieraerosol beiliegende Gebrauchsinformation gelesen werden.

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>5</b></p>	<p><b>6</b></p>	<p><b>7</b></p>
<p>Die Inhalierhilfe vor dem Gebrauch sorgfältig überprüfen, ob das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut wurde, Teile fehlen oder beschädigt sind. Im Falle eines Defekts sofort austauschen.</p>	<p>Die Schutzkappe vom Dosieraerosol abnehmen.</p>	<p>Das Dosieraerosol unmittelbar vor Gebrauch gemäß seiner beiliegenden Gebrauchsinformation schütteln.</p>	<p>Das Dosieraerosol in die Rückseite der Inhalierhilfe einsetzen.</p>	<p>Die Maske auf das Gesicht aufsetzen und sicherstellen, dass sie optimal anliegt. Der <b>Flow-Vu</b>-Indikator bewegt sich nur, wenn eine gute Abdichtung gewährleistet ist. Die ausgeatmete Luft entweicht durch das Ausatemventil.</p>	<p>Sanft ausatmen und das Dosieraerosol zu Beginn einer langen Inhalation auslösen. Langsam und tief durch den Mund einatmen, bis ein voller Atemzug genommen wurde. Wenn der Patient einatmet, sollte sich der farbige <b>Flow-Vu</b>-Indikator in Richtung Patient bewegen. Die Abdichtung für 5–6 Atemzüge aufrechterhalten. <b>LANGSAMER ATMEN</b>, wenn die <b>FlowSignal</b>-Pfeife ertönt. Das Signal zeigt an, dass der Patient zu schnell atmet.</p>	<p>Zur Wiederholung der Schritte 3–6 den Zeitraum einhalten, der in der Gebrauchsinformation des Dosieraerosols angegeben ist.</p>

## REINIGUNGSANLEITUNG

Die AeroChamber Plus\* Flow-Vu\* sollte wöchentlich gereinigt werden.

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>5</b></p>
<p>Das Rückteil abnehmen. Um das Vorderteil zu entfernen, die Inhalierhilfe wie oben gezeigt drehen.</p>	<p>Alle Teile 15 Minuten lang in eine milde Lösung aus Geschirrspülmittel und lauwarmem sauberen Wasser einweichen. Behutsam hin- und herbewegen. Mit sauberem Wasser abspülen.</p>	<p>Die Teile in den oberen Einsatz der Geschirrspülmaschine legen. Sicherstellen, dass die einzelnen Teile in vertikaler Stellung platziert sind (siehe Abbildung). Nach der Reinigung aus der Geschirrspülmaschine nehmen.</p>	<p>Überschüssiges Wasser abschütteln und die Teile in vertikaler Stellung an der Luft trocknen lassen. Vor dem erneuten Zusammenbau darauf achten, dass alle Teile trocken sind.</p>	<p>Beim Zusammenbau das Vorderteil am Ende der Kammer anbringen und drehen, bis es in seiner Position verriegelt ist.</p>



Maske für Säuglinge Ab 0–18 Monate  
 Maske für Kinder Ab 1–5 Jahren  
 AC\* Girlz\* Ab 5 Jahren  
 AC\* Boyz\* Ab 5 Jahren  
 Mit Mundstück Ab 5 Jahren  
 Maske für Erwachsene und Kinder Ab 5 Jahren

### Hinweis:

- Lesen Sie die dem Dosieraerosol beiliegende Gebrauchsinformation sorgfältig und befolgen Sie diese.
- Enthält kein Bisphenol A (BPA), Phthalat, Blei oder PVC.
- Die AeroChamber Plus\* Flow-Vu\* sollte nach durchgehender 12-monatiger Verwendung durch eine neue ersetzt werden.
- Bei einer Ansammlung von Medikamenten in der Kammer diese mit einem weichen Tuch säubern.
- Bei der Reinigung in der Geschirrspülmaschine einen Klarspüler verwenden. Das Spülen mit stark verschmutztem Geschirrwird nicht empfohlen. Bis zu 70 °C spülmaschinenfest.
- Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise oder Verwendbarkeit der AeroChamber Plus\* Flow-Vu\* haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



**Achtung:** Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der AeroChamber Plus\* Flow-Vu\* lassen.



Enthält kein Latex



Chargenbezeichnung



Trudell Medical International\*  
725 Third Street, London, Ontario,  
Canada N5V 5G4  
customer.service@trudellmed.com  
+1-519-455-7060  
www.trudellmed.com

Trudell Medical International Europe Limited  
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,  
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

Alleinvertrieb Deutschland  
**HEXAL AG**  
Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen  
☎ (08024) 908-0  
☎ (08024) 908-1290  
✉ service@hexal.com

